



Huolto- ja hoito-ohjeet

Sisällys

1. Altaat ja tarvikkeet	1
2. Hanat ja tarvikkeet	2
3. Korkeussäädettävä WC-istuinelementti.....	2
4. WC-istuimet ja kannet.....	3
5. WC-tukikaiteet ja tarvikkeet.....	3
6. Tukikahvat ja suihkutanko	4
7. Suihkuistuimet.....	4
8. Kylpyhuonekaapit	5
9. Peilit, peilikaapit ja valaisimet	5
10. Tarvikkeet	6

1. Altaat ja tarvikkeet

5200 Bano allas 1000 x 500 mm

5202 Bano korkeussäädettävä allas hygieniasuojalla 1032 x 588 mm

7200/7201/7202-02 Bano universal-pesuallas 800x600mm

8200 Bano HC-Pesuallas 655 x 560 mm

5207-02 Bano korkeussäädettävät kannakkeet (5200 altaalle)

52088 Bano kiinteät kannakkeet (5200 altaalle)

52093 Bano vino vesilukko + joustava poistovesiputki

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spriitä tai tärpättiä ei saa käyttää.

5207-EL Bano korkeudensäätö- sähkö 660 x 470 x 100 mm (5202 altaalle)

5207-MA Bano korkeudensäätö- veivitoiminen 660 x 470 x 100 mm (5202 altaalle)

52070 Bano kiinteät kannakkeet 660 x 470 x 100 mm (5202 altaalle)

Hoito ja huolto

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spriitä tai tärpättiä ei saa käyttää.

Muunlainen liikkuvien osien huolto ei ole tarpeellista, mutta Bano suosittelee käyttämään korkeussäätöä säännöllisesti.

Kierrätys

Tuotteen voi kierrättää. Sähköosat on helppo irrottaa ja kierrättää vaatimusten mukaan.

2. Hanat ja tarvikkeet

5805 Bano allashana pitkällä vivulla

5802 Bano allashana lyhyellä vivulla

58820-01-16 Bano suihkukahva ja letku

58820 Bano suihkutermostaatti

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spritiä tai tärpättiä ei saa käyttää.

3. Korkeussäädettävä WC-istuinelementti

5970S2-EL Motorisoitu korkeudensäätö

5970-MA Veivitoiminen korkeudensäätö

5970-22 Jatkopala Bano-säiliön taakse 50mm

5970-23 Jatkopala Bano-säiliön taakse 100mm

Hoito ja huolto

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spritiä tai tärpättiä ei saa käyttää.

Muunlainen liikkuvien osien huolto ei ole tarpeellista, mutta Bano suosittelee käyttämään korkeussäätöä säännöllisesti.

Kierrätys

Tuotteen voi kierrättää. Sähköosat on helppo irrottaa ja kierrättää vaatimusten mukaan.

4. WC-istuimet ja kannet

5965 Bano WC-istuin 530 mm

5975 Bano WC-istuin 700 mm

5970 Bano istuinrenkas ja kansi

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spritiä tai tärpättiä ei saa käyttää.

5. WC-tukikaiteet ja tarvikkeet

5600/5607 Bano korkeussäädettävä WC-tukikaide

5601-02/5608-02 Bano kiinteä WC-tukikaide

5603/5604 WC-tukikaide Bano WC-istuimeen (5970-EL/MA)

5603-EL/5604-EL WC-tukikaidepari säätönapeilla Bano WC-istuimeen (5970-EL)

5972-02 Bano harmaa selkätuki 700 mm 5970 wc-istuimeen

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spritiä tai tärpättiä ei saa käyttää.

6. Tukikahvat ja suihkutanko

5440 Bano tukikahva 400 mm

5460 Bano tukikahva 600 mm

5480 Bano tukikahva 800 mm

54100 Bano tukikahva 1000 mm

5591/L Bano kulmatukikahva (vasenkätinen)

5591/R Bano kulmatukikahva (oikeakätinen)

5581/L Bano suihkutanko (vasenkätinen)

5581/R Bano suihkutanko (oikeakätinen)

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spriitä tai tärpättiä ei saa käyttää.

7. Suihkuistuimet

5700-02 Bano korkeussäädettävä suihkuistuin

5710-02 Bano käsinojat

5701-02 Bano suihkuistuin ilman korkeudensäätöä

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spriitä tai tärpättiä ei saa käyttää.

8. Kylpyhuonekaapit

5302 Bano kylpyhuonekaappi 1800 x 400 x 400mm

5302-30 Bano kylpyhuonekaappi 1800 x 300 x 400 mm

5303-34/5303-44 Bano kylpyhuonekaappi kahdella ovella 1800 x 300/400 x 400 mm

5304-34F/5304-44F Bano kylpyhuonekaappi 1330 x 300/400 x 400 mm

5304-34/5304-44 Bano kylpyhuonekaappi 1330 x 300/400 x 380 mm

8341 Bano sivukaappi 650 x 325 x 170 mm

8300 Bano yläkaappi/vaakataso 325 x 650 x 170mm

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spriitä tai tärpättiä ei saa käyttää.

9. Peilit, peilikaapit ja valaisimet

945070 Peilikaappi suoralla ovella

945070K Peilikaappi kallistetulla ovella

5101-02 Bano peili kiinnitysklipseillä

5190-01 Bano peili LED-valoilla 3000k

5190-02 Bano peili LED-valoilla 4000k

94PKVER Peilikaappivalaisin ilman pistorasiaa

94PKVV Peilikaappivalaisin vikavirtasuojalla

5110 Bano valaisin

Hoito

Pyyhintä nihkeällä liinalla.

10. Tarvikkeet

5491 Bano tarvikehylly (Voidaan pestä DEKO:ssa)

5596 Bano saippuahylly (Voidaan pestä DEKO:ssa)

5496 Bano roska-astia (Voidaan pestä DEKO:ssa)

3477 Bano WC-harja+teline (Voidaan pestä DEKO:ssa)

5400 Bano koukku

5510 Bano kävelykepin- tai lattialastanpidike

Hoito

Puhdistus normaaleilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käytettävä pehmeää liinaa tai pesusientä, EI SAA KÄYTTÄÄ teräsvillaa tai muita karkeita materiaaleja. Hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja, happoja, metanolia, spriitä tai tärpähtiä ei saa käyttää.